

安定性高く、テコの原理で楽に使える

移乗介助ベルト 「リフティ・ピーヴォ」


リフティ・ピーヴォ
LIFTY-PI:VO

介護する人、

される人、

ユニバーサルデザインで

毎日が楽しくなる。

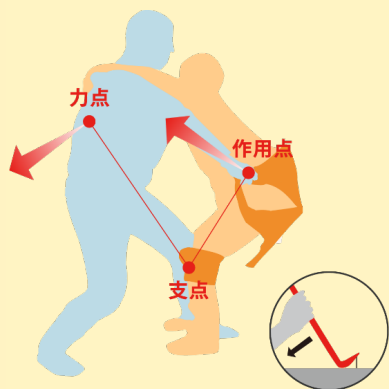

特許第6089176号
介護保険適用

貸与

TAISコード:01652-000006(特殊寝台付属品)



AUN

Action for
universal
design

株式会社エナジーフロント AUN事業部
〒701-0212岡山県岡山市南区内尾394-28
TEL:086-250-6432・URL:www.aun.blue

80kgでも5kg以下に。

持ち運びも簡単。色々な場面で活躍。

介護する人に

- 腰痛の軽減
- 労力の軽減
- ストレスの軽減

介護される人に

- 安心感の向上
- リスクの軽減
- 外出機会を促進


介護現場の声から生まれたLIFTY[リフティ] 重心移動のみでの引き起こしができます。

高齢者の
安心向上

介護者の腰痛
リスク軽減

気軽な
外出促進

● 車椅子からベッドや椅子への移動

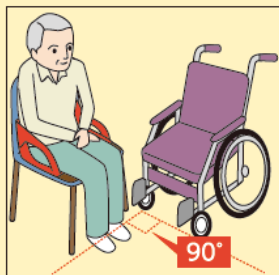

脚の移動がなく、体の向きを変えるだけで移乗が完了するように、座っている場所と直角に車いす(移乗場所)を置きます。



グレーの面を重ね合わせて固定し、pivoを膝に巻きます。上端の部分を膝頭の位置に合わせてください。



こぶしが入る程度、両足を広げます。無理な場合は、膝をそろえたままの状態です。また、pivoのストラップをLIFTYの持ち手に通してバックルをはめます。



膝を折り曲げ、pivoに押し当てます。pivoを挟み、相手の膝間や左右どちらかの膝と接触する状態です。



LIFTYの左右にある持ち手をしっかりと握み、両腕を突っ張ります。この時、重心は差し込んだ前足です。



被介護者の頭が本人の膝より前方にくるように持ち手を引きます。

体重の重い方へ 使用する場合

相手に前かがみになってもらい、LIFTYの持ち手を上からつかみます。その際に、膝をpivoにしっかりと当ててください。



● カラーバリエーション



レッド オレンジ ホワイト デニム

● 仕様/品質

綿100%。滑り止め素材:ビニルレザー、クッション材:ラテックスフォーム、面ファスナー:ポリエステル、プラスチックバックル お手入れ/洗濯機OK(クッション材は取り外してください) 撥水効果が弱くなった時はドライヤーで乾かしてください。サイズ:幅40cm×奥行30cm×高さ30cm、膝ベルト幅15cm×展開長114cm、約1kg。

使い方の動画を公開中!

<http://www.aun.blue/items/236>

リフティ・ピーヴォは
こんなシーンでご利用いただけます。

- ベッドと車いす椅子間の移乗
- 車いすと食卓いす間の移乗
- 車いすと階段リフト間の移乗
- 車いすとシャワーチェア間の移乗など

