


介護負担軽減

てこの原理で
80kgでも5kg以下に

リフトアシストジーンズ
+
ピーヴォ

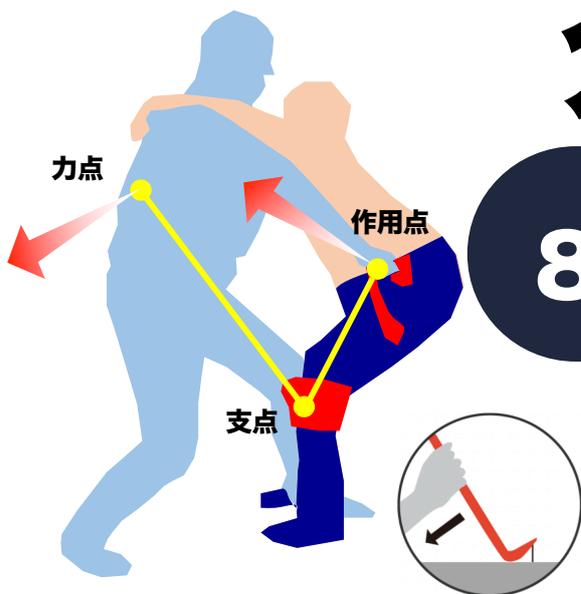

STEP 1

ひざを固定



使い方動画と説明はこちら→

<http://www.aun.blue/lift-assist-jeans/>



STEP 2

相手を前傾に



クッションを入れても良いです



STEP 3

重心を後ろに



ピーヴォ

使用の対象となる方

ピーヴォを使うと、自力で立てない相手も簡単に移乗できます。

- 両足の骨があること（骨が脆い方は使用不可）
- 足の裏全面がが床につくこと
- 体重の目安を超えない相手

相手の体重の目安：前傾になれる相手なら自分の体重の2倍

起立介助 (ピーヴォなし)

膝ぐずれしやすい方はピーヴォを使ってください



肩に手をかけてもらいます



持ち手をつかみます



後ろに下がる重心移動で引き上げます

拘縮があり反った相手には

相手の体重の目安：自分の体重と同等の相手が対象



ピーヴォを巻きつけ膝を押し当てます



脇の下から状態を持ちます



膝を押し当て重心を後ろに引くと相手が上がります

トイレ介助

相手の体重の目安：自分の体重と同等の相手が対象




ピーヴォを巻きつけ膝を押し当てます



押し当てる足と逆の脇に頭を入れます。相手の背中に腕を回し上体を持ち膝をつきます。



押し当てる足と逆の手が自由になります。空いた手でズボンをずらしてトイレに移乗します。

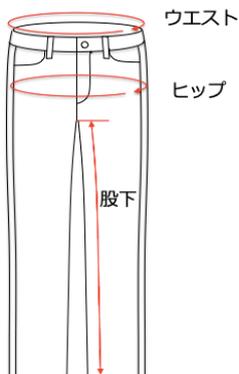

サイズ表 (男女兼用)

サイズ	ウエスト	ヒップ	股下
SS	68-80	98	63
S	80-90	100	65
M	84-100	105	68
L	90-108	108	68
LL	95-113	114	69

定価 (税別) リフトアシストジーンズ19,500円 ピーヴォセット 25,500円

製造元 株式会社エナジーフロント

(店舗) AUN SHOP あうんショップ
〒710-0046 岡山県倉敷市中央1-6-1

TEL: 086-486-3725 FAX: 086-250-6232

E-mail: info@energyfront.jp 受付時間: 10時~16時/ 水・日・祝除く

- ・綿63%、ポリエステル35%、ポリエチレン2%(臀部のみ綿100%)
- ・面ファスナー：ポリエステル