

体位変換 リフティフィット



体位変換リフティフィット

QR
コード
表示



商品詳細

- 【各部品名】 シート(座面)・膝ベルト
- 【サイズ】 シート横40cm×縦30cm
膝ベルト横114cm×縦14cm
- 【総重量】 880g
- 【材質】 生地：綿・ポリエステル
プラスチックバックル

本品にクッションは入っておりません。
ご希望の方は、弊社へお問い合わせください。

特徴

1台3役

1. 体位変換器
2. 移乗サポート
3. シーティング

クッション専用
QRコード表示

製造元

(株) エナジーフロント

〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾394--28

TEL : 086-250-6432

<https://www.aun.blue>

寝ている方を相手・介護している方を自分と表記しています。



相手の腕をまとめ
ます。
膝を立てて下さい。




相手の肩と膝を
持って側臥位に
します。




シートを半分に
折って背中に付け
ましょう。上側の
持ち手を背中側に
向けます。



反対側の
側臥位に
します。

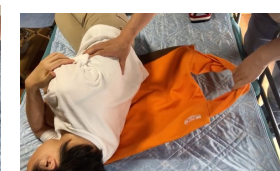


上側の持ち手を
引き出します

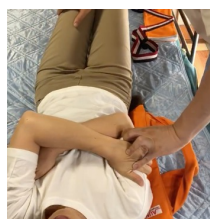

仰臥位に
します。




手前の持ち手を
ベッドの柵と
バックルで
繋ぎます。

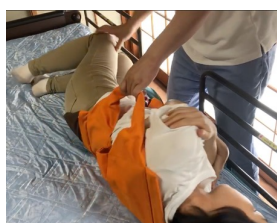

反対側の持ち手
を持って膝を押し
ながら引き起こし
ます。



持ち手とベッドの柵をバックルで繋ぎます。

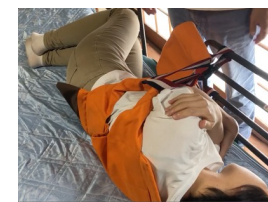

体位変換終了です。

反対側に向ける場合も
同様です。

ご 使 用 方 法

体位変換リフティフィット