


介護の腰痛対策に最適！

てこの原理で
80kgでも5kg以下に

リフティ・ピーヴォ



使い方動画と
説明はこちら→

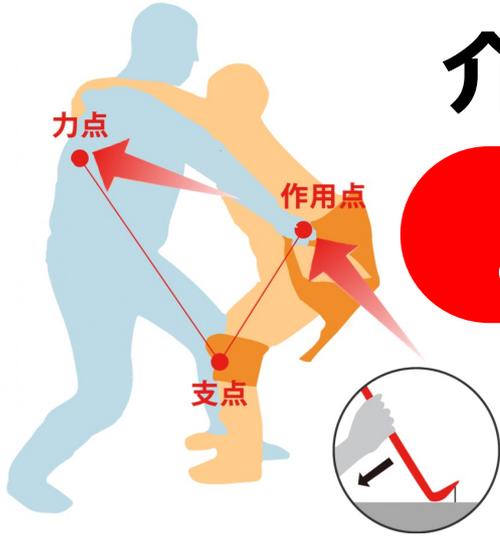

希望小売価格 ¥33,000 (税込)

基本の使い方



①相手 (介護される方)の両足を床に着ける。相手の膝にピーヴォ (膝ベルト)を巻いて自分 (介護者)の膝をピーヴォに押し当てる



②相手を前傾姿勢



③持ち手を持って、両手を伸ばして後ろに引く。相手のお尻が浮くので、回転して移乗

反った方は背中に入れます



ベッドからの移乗はピーヴォの説明を参考にしてください。。

ご使用の判断

• 相手は両足がある
• ひざや足の骨は脆くない
• 著しい尖足等の変形がなく足裏が床につく

No → 使用不可

Yes

• 相手の体重は自分の2倍以下
• 相手の身長は自分より30cm以上大きくない

No → 使用不可

Yes

相手は前傾になれる

No

Yes



座位を保てない相手は腹部にクッションを挟んでも良い



軽い相手は大きく前傾にしないで使える



自分と同等の体重なら上げられるトランスファーボードと組み合わせても良い

介護保険適用について

介護保険適用 (貸与) : リフティピーヴォ
福祉用具貸与 特殊寝台付属品 簡易リフト

TAISコード :

01652-000005 (デニム生地: インディゴ)

01652-000006 (帆布生地: レッド, オレンジ, ホワイト)



(貸与) 特殊寝台付属品

入浴補助用具

介護保険適用 (販売) : リンファイタミ
特定福祉用具購入 入浴補助用具 簡易リフト
01652-000007 (防水畳: グリーン)

製造元 株式会社エナジーフロント

〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾394-28

TEL: 086-250-6432 FAX: 086-250-6232

URL: <https://www.aun.blue>

E-mail: info@energyfront.jp


Facebook



介護の腰痛対策に最適！

ベルト1本! 簡単移乗

膝ベルト「ピーヴォ」

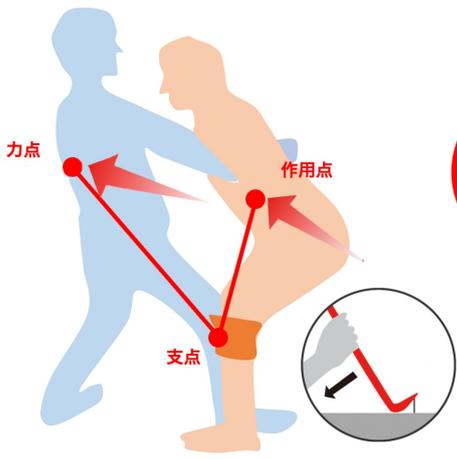

希望小売価格 ¥17,600 (税込)



カラー：オレンジ
紐カット品

簡単3ステップ

使える非介助者の要件：

足に体重がかかっても大丈夫な方。

尖足や骨が脆い方は対象外。骨格に異常がなければ全麻痺でも可



被介助者の両足をきちんと地面につけましょう。膝にピーヴォを巻きます。




膝をしっかり押し当て、脇を持ちます。腰は落とさないこと、腕をしっかり伸ばすことを心がけましょう。



後方上側に向かって大きく反るように引きましょう。相手の頭が膝より手間に来た時にお尻が上がります。どこでもバランスをとってとまれますのであわてずに移乗しましょう。

快適な移乗のヒント

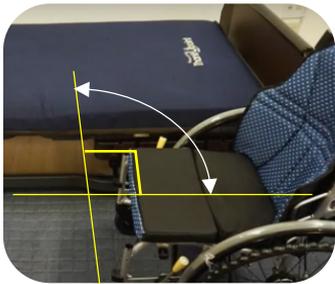

ピーヴォに当てた足を軸に回転します。「直角」と覚えておくと簡単です。



被介助者の足を移乗前後の間になるようにすれば下肢のねじれが起こりません。



乗用車など高い場所への移乗は台を使えば楽になることがあります。

ベッドからの移乗方法



腕をまとめます



相手の膝を立て、ピーヴォを巻きます



引き起こして端座位にして、あとは簡単3ステップと同様です

介護保険適用（販売/入浴補助用具）：リフティタタミ

特定福祉用具購入 入浴補助用具 簡易リフト
01652-000007 (防水畳: グリーン)

リフティ・ピーヴォの完全防水タイプ

濡れない畳で作りました。

【ご使用方法】リフティピーヴォと同じです。



リフティ(畳部)



厚さ
1cm

ピーヴォ(膝ベルト)



希望小売価格
¥38,500(税込)

【素材】畳部:ポリプロピレン、ソフトボード、ポリエチレン
その他:ポリエステル100%、プラスチックバックル

【お手入れ】リフティ(畳部)は洗濯機不可。手洗いのみ。日陰干し

【総重量】700g 【耐荷重】100kg

移乗用 持ち手付きジーンズ：リフトアシストジーンズ



ズボンのみ希望小売価格
¥21,450 (税込)

リフトアシストジーンズと
ピーヴォ(白)セット価格
¥33,000 (税込)

STEP 1
ひざを固定



STEP 2
相手を前傾に



クッションを入れても良いです



STEP 3
重心を後ろに



使い方動画と説明はこちら



【相手の体重の目安】
前傾になれる相手なら自分の体重の2倍

サイズ	ウエスト	ヒップ	股下
SS	60-88	94	63
S	65-93	100	64
M	70-98	104	66
L	75-103	110	67
LL	80-108	115	69

若見え&快適で骨折予防になるズボンです

歩きたい気持ちを応援! 骨粗鬆症の方にもお勧め

「プラスパッド ジーンズ」

トレパンのような柔らかさのストレッチジーンズ
着用後にパッドは体温で柔らかくなり、パッドの存在を
忘れる履き心地です。



大腿骨近位部の骨折リスクを軽減する衝撃吸収パッド




● 大腿骨近位部骨折が寝たきりの原因に
足の付け根にある大腿骨近位部。高齢者の転倒
時にこの部分を骨折することが多く、大腿骨近位
部を破損すると、歩行が困難となり、その結果、
寝たきりの状態を招きます。



● 衝撃吸収パッド

(株)カネカと芝浦工業大学の共同開発による衝撃吸収パッドを
採用。体温で適度な柔らかさを保ち、違和感がなく、様々な転倒
パターンに対応した設計となっています。なお、臨床実験により、
衝撃吸収パッドを装着すると大腿骨近位部の骨折リスクが
19~60%減少^{*}することが確認されています。

ご注意:本品は骨折予防を保証するものではありません。
*原田敦, ヒッププロテクターの効用-臨床試験による検討-
生活生命支援医療福祉工学系学会連合会 2011 講演資料集

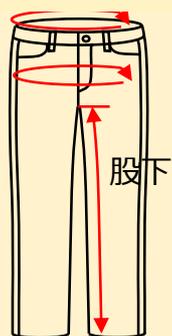

サイズ表 (男女兼用)

サイズ	ウエスト	ヒップ	股下
LL	95~113	114	69
L	90~108	108	68
M	84~100	105	68
S	80~90	100	65
SS	68~80	98	63

【特徴】 ・ 衝撃吸収パッド装着ストレッチジーンズ
・ ウエスト総ゴム入り。

【生地】 ストレッチジーンズ素材
(表地) 綿63%, ポリエステル35%, ポリエチレン2%
(裏地) ポリエステル65%, 綿35%
【パッド】 イソブチレン系熱可塑性エラストマー

【洗濯】 ・ パッドを取り外して洗濯してください。
・ ジーンズは色落ちしますので他のものと分けて
洗濯してください。

(衝撃吸収パッドの装着方法)

パッドは上下の向きがあります。最も大きな孔を上側にしてズボンの内側のインナーウェアに装着してください。
パッドを正しく装着しないと十分な衝撃吸収効果が得られない場合がありますのでご注意ください。

①ズボンを裏返すと、
内側にポケット有り



②パッドの上側を
ポケットに差し込む



③ポケットの下側に
差し込む




④左右2枚を同様に
装着



商品詳細は
こちら↓



希望小売価格
¥26,400(税込)

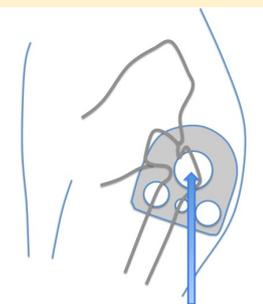

大腿骨の出っ張り部分にピッタリと
当たることを確認してください。

製造元 株式会社エナジーフロント
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾394-28
TEL: 086-250-6432 FAX: 086-250-6232
URL: <https://www.aun.blue>
E-mail: info@energyfront.jp

Facebook

