

リフティピーヴォ 注意事項

リフティ（座面）とピーヴォ（膝ベルト）を結合せずに
ご使用する場合は**座面が上側にすっぽ抜ける**リスク（被介助
者が落ちるリスク）があります

×禁止 上に引っ張らないでください



腰の負担も大きく
なります

◎ 引くのはいつも**介助者の腕の方向**です



【製造元】 〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾394-28
(株) エナジーフロント
TEL(086)250-6432 FAX(086)250-6232