


介護の腰痛対策に最適！

ベルト1本！
てこの原理で **簡単移乗**

膝ベルト「ピーヴォ」

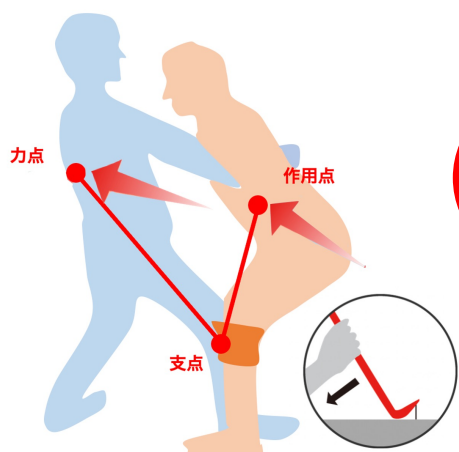

希望小売価格 ¥17,600 (税込)



カラー：オレンジ
紐カット品

簡単3ステップ

使える非介助者の要件：

足に体重がかかっても大丈夫な方。

尖足や骨が脆い方は対象外。骨格に異常がなければ全麻痺でも可



被介助者の両足をきちんと
地面につけましょう。膝に
ピーヴォを巻きます。




膝をしっかり押し当て、脇を持
ちます。腰は落とさないこと、
腕をしっかり伸ばすことを心が
けましょう。



後方上側に向かって大きく反るよう
に引きましょう。相手の頭が膝より手
間に来た時にお尻が上がります。どこ
でもバランスをとってとまれますので
あわてずに移乗しましょう。

快適な移乗のヒント

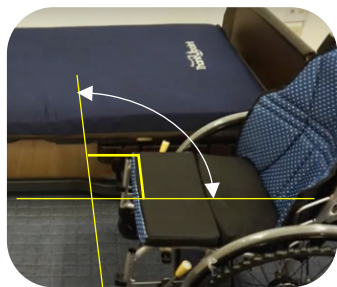

ピーヴォに当てた足を軸に
回転します。「直角」と覚
えておくと簡単です。



被介助者の足を移乗前後の中間
になるようにすれば下肢のねじ
れが起こりません。



乗用車など高い場所への移乗は台
を使えば楽になることがあります。



ベッドからの移乗方法



腕をまとめます



相手の膝を立て、ピーヴォを
巻きます



引き起こして端座位にして、あと
は簡単3ステップと同様です