## リハビリと介護の腰痛対策に最適!



> 足に体重がかかっても大丈夫な方。

▶ 骨格に異常がなければ全麻痺でも可

> 尖足や骨が脆い方は対象外。

# 簡単移乗ポケットに入る移乗具

#### 商品名

## ピーヴォ(膝ベルト)紐なし





カラー: オレンジ 希望小売価格(税込)

¥17,600

使い方は こちら<sup>』</sup>



#### 簡単3ステップ



①被介助者の両足を地面につける ②膝にピーヴォを巻く



③介助者の膝をしっかり押し当てる④脇を持つ。腰は落とさない、腕をしっかり伸ばすことが重要!!



⑤腕を伸ばした状態で反るように引く 被介助者の頭が膝より手前に来た時に お尻が上がるので移乗

### ベッドからの移乗方法



●被介助者の腕をまとめる




②被介助者の膝を立て、 ピーヴォを巻く



砂被介助者を端座位にする②上記の簡単3ステップの③と同様

#### 快適な移乗のヒント

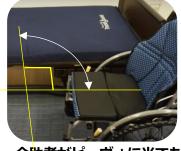

介助者がピーヴォに当てた 足を軸に回転して移乗。 移乗先は「直角」に配置。



被介護者の下肢のねじれは、 被介助者のかかとを移乗先に 近づけると良いです。





乗用車など高い場所への移乗は台を使えば楽になることがあります。

製造元(株)エナジーフロント お問合せ先: 086-250-6432