


介護の腰痛対策に最適！

ベルト1本!
てこの原理で **簡単移乗**

膝ベルト「ピーヴォ」



カラー：オレンジ
紐カット品

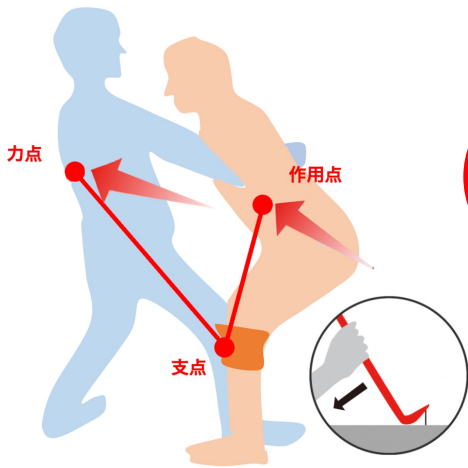

希望小売価格 ¥17,600 (税込)

使える非介助者の要件：

足に体重がかかっても大丈夫な方。

尖足や骨が脆い方は対象外。骨格に異常がなければ全麻痺でも可

簡単3ステップ



被介助者の両足をきちんと地面につけましょう。膝にピーヴォを巻きます。




膝をしっかり押し当て、脇を持ちます。腰は落とさないこと、腕をしっかり伸ばすことを心がけましょう。



後方上側に向かって大きく反るように引きましょう。相手の頭が膝より手間に来た時にお尻が上がります。どこでもバランスをとってとまれますのであわてずに移乗しましょう。

快適な移乗のヒント

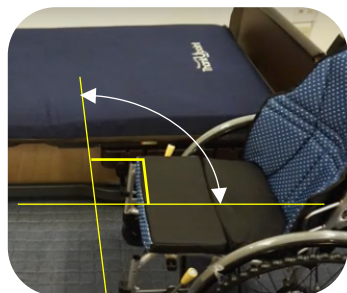

ピーヴォに当てた足を軸に回転します。「直角」と覚えておくと簡単です。



被介助者の足を移乗前後の中間になるようにすれば下肢のねじれが起こりません。



乗用車など高い場所への移乗は台を使えば楽になることがあります。



ベッドからの移乗方法



腕をまとめます



相手の膝を立て、ピーヴォを巻きます



引き起こして端座位にして、あとは簡単3ステップと同様です