

移乗 介助の腰痛対策に リフティピーヴォ（介助ベルト）

てこの原理で
80Kgでも5Kg以下に



ベッドからの移乗 ①～⑤



①車椅子にリフティ
（座面）をセット



②相手の膝にピーヴォ（膝
ベルト）を巻く



③相手を端座位の状態に
して、相手の両足を床に
着ける



④自分の膝をピーヴォに押し
当てる。相手の両脇の下に
自分の手を入れて後ろに引く

腰は落とさず
高くします。



⑤相手のお尻が浮くと回転して
移乗。
リフティの持ち手と
ピーヴォのバックルを繋ぐ



リフティ
（座面）



ピーヴォ
（膝ベルト）

電源不要で
災害時などでも活躍

車いすからの移乗 ⑥～⑨



⑥相手の両足を床に
着ける。
相手の膝にピーヴォを
巻いて自分の膝を
ピーヴォに押し当てる



⑦相手を前傾姿勢



⑧自分がリフティの
持ち手を持って、
両手を伸ばして
後ろに引く

腰は落とさず
高くします。

⑨相手のお尻が浮くので回転して移乗

スライド移動させたい時



滑り止めの茶色
生地を上側に
すれば滑ります