

介護保険適用（販売/入浴補助用具）:リフティタタミ(入浴用介助ベルト)

特定福祉用具購入 入浴補助用具 簡易リフト  
01652-000007 (防水畳: グリーン)

リフティ・ピーヴォの完全防水タイプ

濡れない畳で作りました。

【ご使用方法】リフティピーヴォと同じです。



希望小売価格  
¥38,500(税込)

使い方動画  
はこちら↓



【素材】座面:ポリプロピレン、ソフトボード、ポリエチレン  
その他:ポリエステル100%、プラスチックバックル  
【お手入れ】座面は洗濯機不可。手洗いのみ。日陰干し  
【総重量】700g 【耐荷重】100kg

使える非介助者の要件:

足に体重がかかっても大丈夫な方。

尖足や骨が脆い方は対象外。骨格に異常がなければ全麻痺でも可

ベッドからの移乗方法



事前に座面のみを車イスに  
セットして置きます。  
相手の腕をまとめます。



相手の膝を立て、膝ベルトを  
巻きます。



相手を引き起こして  
端座位にします。



相手の両足を地面に  
つけましょう。



自分の膝を膝ベルトに押し当  
て、相手の脇を持ちます。

腰は高く  
落とさない



自分の後方上側に向かって大きく反るよ  
うに引きましょう。相手の頭が膝より  
手前に来た時にお尻が上がります。  
回転し車イスに座らせます。膝ベルトの  
黒色の紐を座面の持ち手に通してバック  
ルで止めます。  
この後は表面の基本の使い方に移乗しま  
しょう。

製造元 株式会社エナジーフロント  
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾394-28  
TEL: 086-250-6432 FAX: 086-250-6232  
URL: https://www.aun.blue  
E-mail: info@energyfront.jp

Facebook

