


ベッドから車いすへの移乗方法



使い方動画▶▶▶



① 車椅子にリフティ（座面）を置く

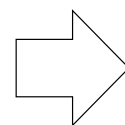

② 相手の膝にピーヴォ（膝ベルト）を巻く
グレーの生地同士重が引っ付きます

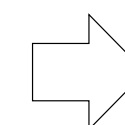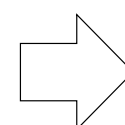


③ 相手を端座位の状態にします
相手の両足を床に着ける





④ 自分の膝をピーヴォに押し当てる。
相手の両脇の下に自分の手を入れて後ろに引く

腰は落とさず
高くします

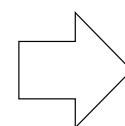

⑤ 相手のお尻が浮くので回転して移乗

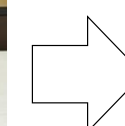
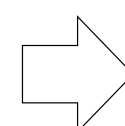


⑥ リフティの持ち手と
ピーヴォのバックルを繋ぐ



拘縮があり、反った方への使い方

別の人が背中を押すと軽くなります

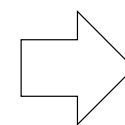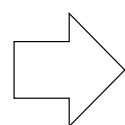

重心を自分の後ろ側の足に移し
自分の体を後ろに引きながら
リフティの持ち手を引っ張ります

スライド移動させたい時



着座時に、
滑り止め生地
（茶色）を
上側にすれば
滑ります。

リフティの上側を茶色
（滑り止め）にして背中
に差し込みます

ピーヴォに自分の膝を押し
当て脇の下からリフティの
持ち手をつかみます