

移乗介助の **腰痛対策** に リフティピーヴォ (介助ベルト)

てこの原理で
80kgでも5kg以下に
電源不要!! 災害時也大活躍



基本の使い方



①車椅子にリフティピーヴォを置き、着座の状態
相手（介護される方）の両足を床に着ける
相手の膝に膝ベルトを巻き、グレーの生地同士を
引っ付けて自分（介護者）の膝を押し当てる

②相手を前傾姿勢にします・前傾になるほど軽く移乗できる



軽い相手なら、腕を肩や腰に回しても良い



重い!危険!



腰を落としてはいけません

腰は
落とさず
高く
します



③持ち手を持って、両手を伸ばし後方(腕の方向)に引く
相手のお尻が浮くので、回転して移乗する



重い!危険!



真上に引くと座面が
抜けるリスクがある